

LA DOMUS
MEDICA
DEL TERZO
MILLENNIO

L'AMBULATORIO MEDICO

ANNO XXI - periodico di informazione scientifica a diffusione mirata

61

IN QUESTO NUMERO

- La nuova Allergan Aesthetics, da 30 anni impegnata nella ricerca sulla Medicina Estetica
- L'evoluzione della luce come cross-linkante naturale: I biostimolanti total green del futuro
- Radical Night Repair di ZO Skin Health, retinolo 1% topico, nel trattamento del fotodanneggiamento cutaneo
- L'innovazione di Therma D.A.S. con la procedura Intralifting
- Polinucleotidi Altamente Purificati PN-HPT™
- Dall'America i nuovi fili in PDO di Croma Pharma
- Less Is More! Approach: 2.4 o 3.6? Acido ialuronico: ad ogni età, la giusta quantità
- Nuovo Filler con tecnologia XTR™ per una proiezione efficace e un supporto tridimensionale dinamico

Ritarda

Keywords: child sexual abuse; disclosure; disclosure strategies

COAXMED ONE: INTEGRAZIONE E TECNOLOGIA

Operatività eccezionale attraverso l'integrazione di un sistema di modularità tecnologica di ultima generazione, con dispositivi di comprovata efficacia clinica in grado di trattare gli inestetismi di viso e corpo.

Se state leggendo questo articolo, allora non c'è dubbio che avete pensato o state considerando una procedura medica ad ampia versatilità, che sia efficace e sicura allo stesso tempo. Le procedure medico-estetiche più richieste sono quelle per il ringiovanimento della pelle e per la scultura del profilo corporale. Sono ormai note e disponibili in numerosi studi medici le procedure di criolipolisi, radiofrequenza, ultrasuoni e laser. Molto prima che questo tipo di tecnologie fossero disponibili, la Chirurgia Estetica era l'unica opzione, con l'utilizzo di procedure più complesse, tempi di inattività lunghi, effetti collaterali imprevedibili. COAXMED ONE con tecnologia Flexi è stato sviluppato per fornire trattamenti di face e body sculpting su misura per le esigenze specifiche del paziente. La nuova tecnologia offre al medico uno strumento d'avanguardia che soddisfa appieno le esigenze dei pazienti di oggi, tenendo conto delle indicazioni cliniche e delle specifiche aree del viso e del corpo.

MASSIMA SODDISFAZIONE

«Un unico approccio clinico non va bene per tutti. Ecco perché abbiamo rivoluzionato l'offerta clinica con COAXMED ONE» afferma Fulvio Ferrari, CEO di Biotec Italia. *«Siamo partiti dalla necessità di una soluzione che potesse soddisfare le esigenze cliniche di medici e pazienti nelle procedure non invasive del viso e del corpo, affidandoci a tecnologie di comprovata e documentata efficacia clinica».* *«Sempre più pazienti cercano di scolpire, rimpolpare, levigare la pelle di viso e corpo, oltre a ridurre i depositi di grasso, nelle aree più ostinate e difficili da trattare»* testimonia il dottor Vincenzo Bucaria. *«Grazie alla tecnologia*

COAXMED ONE, sono ora in grado di personalizzare il trattamento in base alle esigenze di ogni paziente, ottenendo il risultato desiderato». L'interfaccia del sistema, facile da usare, è dotata del riconoscimento automatico della tecnologia che si vuole utilizzare. Per gli inestetismi del viso viene utilizzata la radiofrequenza di superficie, di media o alta profondità, oltre al sistema frazionato, particolarmente efficace nel trattamento di cicatrici da acne e nel ringiovanimento della pelle. Nel trattamento di definizione dei contorni del corpo viene utilizzata la CRYOLIPOSCULPT, la recente tecnica che ha dimostrato essere l'evoluzione della criolipolisi, la radiofrequenza di profondità, combinata con l'ultrasuono e il massaggio endodermico, il laser combinato con la cryoterapia e il massaggio endodermico. COAXMED ONE è la piattaforma che garantisce la più ampia varietà di applicazioni medico-estetiche.



Dr. Vincenzo Bucaria
Chirurgo Plastico Ricostruttivo



Fulvio Ferrari
CEO Biotec Italia

Le tecnologie possono essere integrate al dispositivo in tempi diversi, offrendo a noi medici la piena versatilità e autonomia nella gestione dell'acquisto.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA

Quali sono le tecnologie disponibili nel dispositivo COAXMED ONE?

Per il viso: Ablaze, la radiofrequenza intelligente.

- **Modalità Cooltec**, che refrigera la testa del manipolo e protegge la superficie della pelle, mentre la pelle in profondità raggiunge sino a 65°C.

- **Modalità 3Density**, che modula in automatico la frequenza del campo elettrico emesso nella pelle, per una penetrazione tridimensionale e omogenea della radiofrequenza.

- **Propatch**: patch in gel salino monouso che garantisce sterilità e sicurezza, oltre a garantire uniformità nell'emissione della radiofrequenza, eliminando i rischi da ustione, conseguenza della concentrazione della corrente in un unico punto.

- **EndoShape**: azione sinergica di aspirazione ritmica e radiofrequenza che aumenta il flusso del sangue e il drenaggio linfatico, ringiovanendo i tessuti e agendo in modo mirato sul rilassamento cutaneo.

• **SkinTite:** la radiofrequenza monopolare è emessa per mezzo di microaghi su tutta la lunghezza dell'elettrodo e agisce con il vacuum ritmato per favorire lo scollamento sottocutaneo e una penetrazione dell'ago in assenza di trauma. Gli elettrodi, microaghi, sono monouso, sterili da 0,25 mm a 2,5 mm a seconda della zona da trattare.

Per il corpo: integrazione per un'efficacia clinica ineguagliabile.

• **Applicatore Duoshape:**

- **Modalità 3Density,** che modula in automatico la frequenza del campo elettrico per una penetrazione tridimensionale e omogenea della radiofrequenza nella pelle e nel tessuto adiposo.

- **Modalità PerfectTune,** con raffreddamento ad acqua dell'ultrasuono che garantisce efficienza, sicurezza e comfort.

- **Frequenza** dell'ultrasuono stabile a 28 kHz.

- **Vacuum ritmato,** che migliora l'accoppiamento dell'applicatore con la pelle ed enfatizza gli effetti della radiofrequenza e degli ultrasuoni.

• **Applicatore Vaculase:**

- **Laser:** il riscaldamento prodotto dal laser riattiva e amplifica la microcircolazione arteriosa, venosa e linfatica e favorisce la neoangiogenesi dei vasi intradermici. L'energia della luce laser produce inoltre effetti positivi sull'attività dei fibroblasti.

- **Cryo:** il sistema di raffreddamento localizzato riduce l'edema e ottimizza il riassorbimento dei fluidi in eccesso, stimolando l'attività vascolare.

- **Vacuum ritmato:** il massaggio endodermico migliora la circolazione sanguigna, favorendo il drenaggio linfatico e quindi promuovendo una riattivazione metabolica a livello del tessuto adiposo. Ne risultano uno straordinario miglioramento della texture cutanea e una notevole riduzione delle circonferenze.

- **Applicatori Cryoliposculpt,** l'evoluzione della criolipolisi.

- **Cryo:** la plica di tessuto aspirata all'interno dell'applicatore viene mantenuta a una temperatura costante di -10°, costantemente monitorata da un sistema di sicurezza.

- **TissueActive:** preserva la vascolariz-

zazione del tessuto grazie alla sinergia delle tecnologie Coolfrequency® e Vacupulse®.

- **Coolfrequency:** stimola lo scambio ionico intra ed extracellulare, consentendo la corretta funzionalità delle cellule e contribuisce all'eliminazione dell'effetto "blocco di ghiaccio" nella porzione di tessuto trattato.

- **Vacupulse:** aspirazione attiva che provoca lo scollamento dei tessuti e modifica la resistenza e l'elasticità del tessuto connettivo mantenendo in mobilità i tessuti e stimolando il microcircolo.

QUALI LE INDICAZIONI D'USO?

Le indicazioni terapeutiche: PEFS (panniculopatia edema fibro sclerotica). Le indicazioni estetiche: Trattamento adipe, Protocollo acne, Invecchiamento pelle, Trattamento per la riduzione della lassità cutanea, Trattamento linfodrenaggio, Trattamento lifting, Trattamento adipe sul petto dell'uomo, Trattamento rimodellante della pelle (contour), Trattamento riparazione pelle, Protocollo smagliature, Protocollo lassità cutanea e muscolare. ■



biotec italia

coaxmed
ONE

Tecnologie intelligenti
che rivoluzionano
le performance
ed i risultati.

- Cryoliposculpt®
- Endoshape® face
- SkinTite®
- Duoshape®
- Vaculase®



Prima (SkinTite)

30 giorni Dopo/4 sessioni



Prima (Duoshape)

60 giorni Dopo/4 sessioni



Prima (Ablaze)

30 giorni Dopo/4 sessioni

BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)
VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

YouTube Instagram Facebook LinkedIn



biotec italia
Medical